

Begleitprotokoll zur Entnahme von Haaren

- Pferd
- Rind
- Schwein
- Esel
- andere _____

Angaben zur Probe

Name: _____

UELN / Tier ID: _____


LABORNUMMER

Wird vom Labor eingetragen

Anleitung zur Probenahme:

- dicke Haare aus Schweif, Mähne, Schwanzquaste o.ä. mit deutlich sichtbarer Haarwurzel verwenden
- dem Tier ca. 30 dieser Haare mit Wurzel ausziehen (Nicht abschneiden! Haare ohne Wurzel sind für uns wertlos.)
- Haare so bündeln, dass die Haarwurzeln in Pfeilrichtung weisen (siehe Beispiel rechts) und auf einer Höhe liegen
- Haarbündel mit Klebestreifen in das Feld unten aufkleben. Die Haarwurzeln müssen ca. 1,5 cm über den Klebestreifen hinausragen, damit wir sie im Labor abschneiden können. Die am unteren Ende über den Klebestreifen hinausragenden Haar-Enden mit einer Schere abschneiden

Haarwurzeln

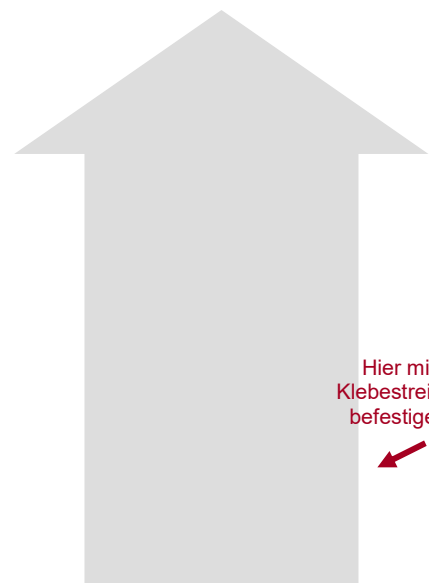

Hier mit
Klebestreifen
befestigen



Haarenden bitte abschneiden